

Instrukcja używania
Obuwie terapeutyczne PAPS
Wyrób medyczny klasy I, wg reguły 1

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją.

Aby wyrób działał zgodnie z jego przeznaczeniem, należy stosować go zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zasięgnąć porady lekarza lub fizjoterapeuty. Instrukcję należy zachować w celu poprawnego używania wyrobu oraz jego właściwej konserwacji.

Przeznaczenie:

Obuwie terapeutyczne PAPS dedykowane jest do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i pozwala na zachowanie ciągłości terapii w przypadku dysfunkcji i chorób stop osobom stosującym różnego rodzaju obuwie i wkładki ortopedyczne. W ten sposób stopy pozostają w optymalnych dla nich, wymaganych warunkach, niezależnie od tego czy pacjent porusza się poza domem czy w środowisku domowym.

Dodatkowo modele PAPS wyposażone w podeszwę wykonaną z poliuretanu (PU) lub termoplastycznego kauczuku (TR) (ME 1011, ME 1052, ME 1053, ME 1054, ME 1055, ME 1056, ME 1057, ME 1058, ME 1059, ME 1060, ME 1061, ME 1062, ME 1063, ME 1064, ME 1065 ME 3030, ME 3031, ME 3032, ME 3033, ME 3034, ME 3035) mogą być użytkowane w warunkach wymagających częstszego czyszczenia oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Modele ME3030, ME 3031, ME 3032, ME 3033, ME 3034, ME 3035 wykonane są w całości z materiałów zmywalnych, które pozwalają na łatwiejsze utrzymanie obuwia w czystości.

Obuwie terapeutyczne PAPS przeznaczone jest do używania przez osoby cierpiące na następujące dolegliwości i jednostki chorobowe: zespół przeciążenia przodostopia, syndrom Mortona, stopa wydrążona, bóle śródstopia (metatarsalgia), nagniotki i modele pod głowami kości śródstopia, stopa płaska, płasko-koślawą, zapalenie przyczepu rozciągną podeszwowego, zapalenie trzeszczek, paluch sztywny, koślawy, stopa cukrzycowa, ostroga piętowa, RZS, częściowa amputacja stopy, złamania, pęknięcia kości śródstopia, stopa wydrążona, stopa płasko-koślawą, nadmierna pronacja/supinacja

Celem stosowania obuwia jest zmniejszanie istniejących dolegliwości, zapobieganie dalszemu rozwojowi schorzeń, uszkodzeniom stopy u pacjentów z wyżej wymienionymi dolegliwościami. Cel ten jest osiągany poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji obuwia i użycia materiałów dostosowanych do takiego przeznaczenia. Naturalny przebieg nie leczonych w/w schorzeń może prowadzić do dalszych dysfunkcji stopy i całego organizmu.

Wykonanie wyrobu:

Obuwie terapeutyczne PAPS składa się z cholewki, podeszwy i wkładki wykonanych z następujących materiałów:

Cholewka - filc wełniano-poliestrowy (filc "oddycha", poliester gwarantuje nierozciągliwość), naturalna skóra świnińska lub bydlęca, materiał podszewkowy

podeszwa - filce poliestrowy z warstwą termoutwardzalną, materiał antypoślizgowy lub podeszwa ze spienionego poliuretanu lub termoplastycznego kauczuku

Wkładka - materiał EVA, powleczenie filc lub skóra naturalna, poduszka pod piętę pianka

Szwy, połączenia wygładzone są tak, aby nie powodować lokalnego ucisku stopy. Podeszwa typu ROCKER (kołyskowa) z uniesionym czubkiem ułatwia przetaczanie stóp (pacjenci problemem z poruszaniem się) oraz odciąża głów kości śródstopia. Elementy regulacyjne, takie jak paski regulacyjno-dociskowe pozwalają na szeroki zakres regulacji, możliwość uzyskania efektu dobrego "docisku" stopy do wkładki.

Użytkowanie:

Obuwie powinno być dobrane w porozumieniu z lekarzem ortopedą, fizjoterapeutą lub innym specjalistą w zakresie medycyny, z uwzględnieniem rodzaju obuwia, czasu noszenia oraz dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych lub pielęgnacyjnych.

Obuwie powinno być noszone odpowiednio zapięte. Dopasuj paski regulacyjne do twoich preferencji, w razie potrzeby obetnij naddatki pasków.

Rekomendowane jest używanie wraz z obuwem skarpet o dostosowanych rozmiarach, bez szwów oraz odpowiednio dobranych wkładek zapewniających właściwą redystrybucję nacisków na stopę.

Sprawdzaj wnętrze butów co najmniej raz dziennie przed ich założeniem. Szukaj twardych krawędzi, brzegów lub zagnieceń itp. na cholewce lub wkładce.

W przypadku modeli wyposażonych w filcową podeszwę zwróć szczególną uwagę na stan materiału antypoślizgowego. Powinien dobrze dolegać do podeszwy. Uszkodzenia/oderwania może prowadzić do potknięcia lub upadku.

Modele wyposażone w sznurowadła – rozważ możliwość zastosowania ogólnodostępnych stoperów lub/i sznurowadeł elastycznych. Pozwalają one zastąpić klasyczne wiązanie butów i wyeliminować ryzyko przewrócenia się przez rozwiązane sznurowadła.

·Jeśli obuwie stanie się wilgotne przez wodę lub pocenie się wyjmij wkładki pozwól na powolne suszenie. Nie wystawiaj obuwia na działanie podwyższonej temperatury lub innych źródeł ciepła takich jak wentylatory, grzejniki itp.

Czyszczenie ważne jest dla zachowania higieny i bezpieczeństwa stopu, ale również przedłużenia żywotności i komfortu stosowania twojego obuwia. Filcowe obuwie można kilkakrotnie prać (bez wkładki) w 30oC i pozwolić na wyschnięcie. W przypadku skóry zamszowej lub Nubuku powinny być stosowane odpowiednie spraye lub szczotki.

Sprawdzaj regularnie zużycie obuwia. Zwykle w pierwszej kolejności zużywa się wkładka. Zapytaj swojego dostawcę o możliwość jej wymiany i przedłużenia możliwości stosowania obuwia

Sprawdzaj swoje stopy regularnie. Jeśli dostrzeżesz znaki, zaczerwienienia lub/i zmiany twoich stóp które spowodowane są przez obuwie lub jesteś zaniepokojony stanem obuwia skontaktuj się z profesjonalistą, który dostarczył ci obuwie tak szybko jak to możliwe.

Ostrzeżenia!

Dobór wkładek w zależności od schorzenia należy uzgadniać z lekarzem specjalistą: diabetologiem, podologiem, fizjoterapeutą, ortopedą.

W przypadku widocznych uszkodzeń obuwia, szczególnie uszkodzeń mechanicznych warstwy mającej bezpośredni kontakt ze skórą stopy lub uszkodzeń podeszwy, należy niezwłocznie wymienić je na nowe, wolne od uszkodzeń.

Konserwacja:

Zabrudzone miejsca przecierać miękką szmatką lub gąbką zwilżoną wodnym roztworem środków piorących. Suszyć w miejscu przewiewnym.

Uwagi

Różnica odcieni poszczególnych par jest następstwem wykorzystywania materiałów naturalnych (skóra) oraz pochodzących z recyklingu. Dwie różne pary mogą mieć inny odcień. Różnice odcieni w lewy i prawy bucie nie powinny występować.

Szczególnie dotyczy to obuwia wykonanego z szarego filcu. Materiał ten powstaje z materiału, który nie jest poddawany procesowi koloryzacji

Informacje środowiskowe

- Produkujemy w EUROPIE przestrzegając wysokich norm środowiskowych
- Wykorzystujemy materiały z RECYKLINGU – filc
- Unikamy NADPRODUKCJI - poprzez skrócenie drogi pomiędzy wytwórcą i konsumentem produkujemy tylko to na co jest zapotrzebowanie (każdy zapas jest wytworzony ze szkodą dla środowiska)
- Unikamy nadmiernego PRZETWARZANIA – każdy proces zużywa energię, której wytworzenie szkodzi środowisku naturalnemu. Stosujemy oszczędne wzornictwo, unikamy farb i klejów, opakowanie stanowi surowy karton.
- Produkt zaprojektowany jest z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Można go naprawiać, wymiana wkładki przedłuża żywotność całego produktu

Wytwórca:

PAPS TOMASZ CYRBUS
ul. Ketlinga 12H/1
81-577 Gdynia

